

LIFECLEAN OVERFLATEDESINFEKSJON BRUKERVEILEDNING



Full effekt mot

Vegetative bakterier, virus, sopp og mykobakterier på 1 minutt. Sporer som f.eks. Clostridium difficile og Bacillus subtilis på 5 minutter. LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av flater

1	Fjern synlig forurensing og vask før desinfisering. Jmf. NS-6600.
2	Det anbefales bruk av ådedrettsvern ved langvarig eksponering, i tillegg til bruk av hansker for å unngå uttørring av huden. Følg lokale retningslinjer.
3	Påfør LifeClean desinfeksjon med ren klut på ønsket flate. Virketid 1-5 minutter. Se til at flaten er fuktig i virketiden, men ikke påfør for mye.
4	Tørk av eller skylle overflaten med rent vann etter desinfeksjon dersom det er usikkerhet rundt materialkompatibilitet. Spesielt viktig på metall/stålflater.
5	Merk LifeClean flasken med åpningsdato. En åpen flaske er holdbar i 4 uker for sporicid effekt, 8 uker for virus, baktericid og mykobaktericid effekt.
6	Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering.

Beskyttelse

Vi anbefaler bruk av egnet ådedrettsvern ved tilstrekkelig ventilasjon, og ved langvarig eksponering. (Ref: sikkerhetsdatablad sek. 8.2.1.)



Påføring med mopp

Legg moppen på et flatt underlag under påføring, unngå å ha denne i ansikts høyde for å unngå ubehag.

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon av utstyr

1	Rengjør utstyret før desinfisering. Påfør LifeClean desinfeksjon.
2	Påfør LifeClean direkte på utstyret med klut, evt. legg utstyret i en beholder med LifeClean.
3	Virketid 1 - max 5 minutter.
4	Vask av utstyret etter virketiden
5	Utstyr som er i kontakt med slimhinner skal, ifølge Statens Legemiddelverk skylles med sterilt vann. Evt. følg lokale retningslinjer.

Holdbarhet i kar:

LifeClean som er overført til annen beholder er holdbar og har effekt opp til 3 timer i åpen beholder og opp til 8 timer i lukket beholder.

Generell informasjon

Desinfiser overflater i henhold til gjeldende prosedyrer. Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.

Innhold

Kloridioksid <0,2% nominell 200 ppm
Tensid <0,2%
pH2

Informasjon om
håndtering,
stabilitet og
materialkompatibilitet,
se sikkerhetsdatablad.