

LIFECLEAN DESINFEKSJON

Ferdig blandet klordioksid løsning til desinfeksjon av flater og utstyr.
BRUKERVEILEDNING

Effektiv mot

Vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier, f.eks. TB og endosporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis*.

Klar til bruk

LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

Innhold

| | |
|------------------|------------------|
| CIO ₂ | Nominell 200 ppm |
| pH | Sur løsning |
| Tensider | <0,2 % |

Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon

| Flater | | Utstyr | |
|--------|--|--|---|
| 1 | Fjern synlig forurensning og organisk materiale. Vask alltid først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier. | 1 | Rengjør utstyret på forhånd. Fjern synlig forurensning og organisk materiale. |
| 2 | Påfør rikelig med LifeClean løsningen på ønsket flate. Virketid 2 minutter. | 2 | Legg utstyret i en beholder med LifeClean eller påfør direkte på utstyret med klut når det ikke tåler å dypes i væske. |
| 3 | Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon om det er usikkerhet om hvordan materialet reagerer med lav pH. Spesielt viktig på store stålflater. | 3 | Virketid min 2 minutter og maks 5 minutter. |
| 4 | Det anbefales regelmessig å tørke av/skylle flatene med rent vann. | 4 | Skylles og tørkes. Utstyr som er i kontakt med slimhinner bør skylles med sterilt vann. |
| 5 | Bruk beskyttelses hansker for å beskytte huden mot uttørring og mot smitterisiko. Ellers følg lokale anbefalinger og retningslinjer. | 5 | LifeClean som er overført til annen beholder er holdbar og har effekt opp til 3 timer i åpen beholder og opp til 8 timer i lukket beholder. |
| 6 | Lukk LifeClean flasken og merk med åpningsdato. En åpen flaske er holdbar i 4 uker etter åpning. | Informasjon om håndtering, stabilitet og materialkompatibilitet, se sikkerhetsdatablad. | |
| 7 | Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering. | | |

 PARTNERMED

www.partnermed.no

PartnerMed AS

Tlf: 468 15 117

Mail: info@partnermed.no



Påføring med spray eller pumpe dyse

Alt 1. Spray eller pumpe dyse kan settes direkte på LifeClean flasken. Vipp av sprute tuten og skru på spray/pumpe dyse, holdbar i 4 uker.

Alt 2. Hell LifeClean over på en sprayflaske. Det anbefales en lystett flaske, holdbar i 8 dager.

Vi anbefaler å skylle spraytappene med vann etter bruk, eventuelt daglig.



Munnbind

Munnbind behøves normalt ikke. P3 maske med partikkelfilter kan anvendes av personer med følsomme luftveier.

LifeClean Desinfeksjon

Desinfeksjon av overflater i henhold til gjeldene prosedyre. Full effekt på bakterier, virus og sopp innen 1 minutt. Ved sporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis* er virkningstiden 2 minutter. Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.