

## Overflatedesinfeksjon



Kiilto Pro Ytidesinfektion 75+ er beregnet for desinfisering av harde overflater som f.eks benker, bord og undersøkelsesbenker. Den er effektiv mot bakterier, sopp og ulike typer virus som Coronavirus, HIV, Hepatitt B og C samt visse nakne virus som Adenovirus og Murine Norovirus. Produktet virker raskt og effektivt uten å etterlate spor på den behandlede overflaten.

### Produktegenskaper

Dokumentert effekt:

EN13727 (bakterier) 30 sek

EN13697 (bakterier) 5 min

EN13624 (gjærsopp) 30 sek, (sopp) 15 min

EN13697 (gjærsopp) 60 sek

EN16615 (bakterier/gjærsopp) – 2 min

EN14476 (kappeklede virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (mykobakterier) 60 sek

### Bruksanvisning

Anvendes på flater som tåler alkohol.

Kiilto Pro Ytidesinfektion 75+ inneholder tensid som gjør at overflaten ikke behøver rengjøres først. Er flaten veldig skitten eller har mye inntørket blod, anbefales det imidlertid å rengjøre med vanlig rengjøringsmiddel først.

1. Sprut rikelig med væske på flaten, alternativt dynk et papirtørk
2. Bearbeid overflaten gjentatte ganger i minst 30 sek (se produktblad for kontakttider)
3. La flaten lufttørke

### Innhold

#### Aktive stoffer

Etanol	75vol%
--------	--------

### Produksjonsland

SVERIGE

Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)
12 x 1 l	495-12	7331964004951	7331964904954
1 x 10 l	497-1	7331964004975	
24 x 300 ml	494-24	7331964004944	7331964904947

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside [www.kiilto.no](http://www.kiilto.no), eller send en epost til vår kundeservice [post.no@kiilto.com](mailto:post.no@kiilto.com).