

plum Plum pH Neutral øyeskyl



pH Neutral øyeskyl til nøytralisering av syre og baser.

Plum pH Neutral er en fosfatbuffer som raskt og effektivt nøytraliserer både syrer og baser. Den har høy væskestrøm og samtidig bevist effekt ved øyeulykker med kjemikalier. Den ergonomiske DUO øyekoppen åpner øyet og skyller begge øynene samtidig.

Produktet kan brukes enkeltvis eller som påfyll i de veggmonterte førstehjelpsstasjonene og boksene.

Bruksområde	4,9 % steril fosfatbuffer som raskt nøytraliserer syrer og baser i øynene. Etter skylling med pH Neutral anbefales det å skylle med Plum Eyewash.
Bruksanvisning	Det er viktig at øyeskyllevæsken treffer øyet i en myk og jevn strøm.
Merk	<p>På arbeidsplasser hvor det brukes kjemikalier, skal arbeidsplassen utstyres med hensiktsmessige førstehjelpstiltak tilpasset arbeidets art.</p> <p>Ved øyeulykker som involverer alle former for øyekorrosjon, må øynene umiddelbart skylles med rikelig med rennende vann. Ifølge Arbeidstilsynet er vann fra øyeskylleflasker å foretrekke.</p> <p>Det anbefales å oppsøke lege for alle typer øyeskader. Du bør imidlertid alltid bruke øyeskyllevæske eller fosfatbufferen (pH Neutral) umiddelbart etter at du har fått en øyeskade, avhengig av skadens art. Ha alltid ekstra flasker innen rekkevidde slik at du kan fortsette å skylle øyet under transport til lege eller legevakt.</p>
Utseende og lukt	Klar væske.
Produksjonsland	DANMARK

Forpakkingsstørrelse / Artikkel nr.	Salgsenhet	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
	6 x 500 ml	614801	5715205480124	5715205480117	Flaske



Tilleggsinformasjon

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.